

Dentilac

PASTA ADHESIVA PARA PRÓTESIS DENTALES

Boquilla de Precisión - Adherencia Segura

INSTRUCCIONES DE USO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACION

Composición:**DENTILAC sabor NEUTRO**

Cada 100 g de pasta contiene: Copolímero de Metilvinil eter anhídrido maleico 30 g, Vaselina líquida 27 g, Carboximetilcelulosa sódica 22 g, Vaselina sólida 21 g.

DENTILAC sabor MENTA

Cada 100 g de pasta contiene: Copolímero de Metilvinil eter anhídrido maleico 30 g, Vaselina líquida 27 g, Carboximetilcelulosa sódica 22 g, Vaselina sólida 21 g, Composición dental 0,1 ml.

Indicaciones: DENTILAC ayuda a fijar los puntos flojos y brinda una adherencia segura de las prótesis dentales.

Información de Uso: Las prótesis dentales adecuadas por su odontólogo a la cavidad bucal, con un ajuste perfecto, teóricamente, no necesitan del uso de adhesivos. Sin embargo, en la práctica esto es difícil, debido a los cambios naturales que sufren los tejidos y al uso de las prótesis durante un cierto tiempo.

DENTILAC es una pasta compuesta por polímeros sintéticos que asegura la íntima adaptación de la prótesis a los tejidos de soporte y su estabilidad ante la diversidad de movimientos funcionales (hablar, comer, bostezar, etc).

Advertencias y Precauciones: Aplicar la pasta sólo en presencia de mucosas bucales sanas. Para mejores resultados, oprima el tubo desde la base, aplane, no lo enrosque. Mantenga la tapa y la abertura secas y limpias, para que no se forme una dureza. Consulte periódicamente a su odontólogo para asegurar una fijación adecuada de su prótesis.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Reacciones Adversas: En casos raros puede producirse hipersensibilidad de la mucosa bucal o general. De ocurrir dicha reacción consulte a su odontólogo.

INSTRUCCIONES: PRÓTESIS COMPLETA

PRÓTESIS SUPERIOR: Limpie cuidadosamente la prótesis y la mucosa bucal eliminando restos de comida. Aplique 3 pequeñas porciones de aproximadamente 1 cm, en la parte central y laterales de la prótesis seca o húmeda. Coloque la prótesis dental en su posición y presione durante unos segundos.



PRÓTESIS INFERIOR: Aplicar DENTILAC como se indica para la prótesis superior.



PRÓTESIS PARCIAL: Aplique 3 pequeñas porciones de aproximadamente 1 cm, en la parte central y laterales de la prótesis seca o húmeda. Coloque la prótesis dental en su posición y presione durante unos segundos.



Cada usuario debe adaptar en forma individual la frecuencia y cantidad de **DENTILAC** que debe usar. La boquilla de precisión permite aplicar la cantidad justa y controlada para:

- Otorgar una mejor fijación.
 - Aumentar la estabilidad de la prótesis.
 - Reforzar el sellado de la prótesis, evitando la introducción de partículas de alimentos.
 - Lograr una prótesis mejor adaptada permitiendo el aumento de la fuerza masticatoria.
- Esperar unos 5 minutos antes de ingerir alimentos.



Mantener en posición vertical.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Conservación: Conservar el pomo bien cerrado, a temperatura inferior a 25° C.

Seguridad del envase: Pomo multilaminado. El estuche presenta 2 etiquetas autoadhesivas de seguridad. Una en cada extremo del mismo. Constatar integridad del estuche. No utilizar luego de su vencimiento. No colocar en heladera y/o lugares fríos. Cuide su salud bucal. Consulte periódicamente a su Odontólogo.

Presentación:

DENTILAC sabor NEUTRO: envases con 20, 40 y 60 g.

DENTILAC sabor MENTA: envases con 20, 40 y 60 g.

Laboratorios Bernabó S.A. Terrada 2346, C1416ARZ, CABA, Teléfonos: 4501-3278/79.

www.laboratoriosbernabo.com

Elaboración: Cnel. Méndez 440, B1875DQJ, Wilde, Pcia. de Buenos Aires.

Autorizado por la ANMAT PM -1404 -11

Director Técnico: Vicente López González. Farmacéutico.

